

NUANCIER

0,0 g/l < Taux < 0,5 g/l



Tube



Taux \geq 0,5 g/l



Tube



MEDISUR
ma santé en main

ÉTHYLOTEST À USAGE UNIQUE



SEUIL DE DETECTION :

0,25 mg/l d'air expiré = 0,5 g/l de sang

DÉVELOPPÉ & PRODUIT
EN FRANCE



- ✓ SANS BALLON PLASTIQUE
- ✓ CONFORME NFX 20-702
- ✓ CONFORME REACH

1 Tenir l'éthylotest pendant 30 secondes dans votre main fermée.




30 sec.

2 Mettre en service le test en pressant sur les 2 embouts blancs de façon à perforer les membranes en aluminium.



3 Inspirer profondément puis souffler lentement dans le sens indiqué en plaçant vos lèvres du côté de l'anneau rouge.

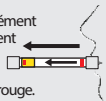

AVERTISSEMENT : le soufflage doit être continu et sans interruption.

4 Cesser de souffler dès que la couleur de pastille correspond à un des trois cas ci-dessous :



Utilisation : 10°C à 40°C
Stockage : -20°C à 70°C

Avant utilisation :

Attendre 10 min après la dernière ingestion d'alcool ou d'autres substances (spray, médicament...) avant d'effectuer un test.

L'alcoolémie maximale est atteinte 45 min à 60 min après le dernier verre d'alcool.

Risques :

Au-delà de 0,5 g d'alcool par litre de sang, les risques d'accident sont multipliés par 3.

Conduire après avoir consommé de l'alcool fait courir des risques extrêmes au conducteur, ses passagers et tous les usagers de la route.

Distributeur : MEDISUR

100 Impasse des Houillères
13590 Meyreuil, France
+33 4 42 96 09 68
contact@medisur.fr
www.medisur.fr

Fabriquant : TURDUS

770 Avenue de la Méridienne
Z.A. Sainte Catherine
48100 MARVEJOLS - FRANCE

Interprétation :

1- Attendre que la pastille redevienne entièrement rouge.

En présence d'alcool, le réactif se colore en vert.

2- Comparer la couleur obtenue à celles du nuancier fourni (sur le recto de cette notice) :

- Si la couleur est comparable à celle indiquée dans le rectangle vert, vous pouvez conduire.

- Si la couleur est comparable à celle indiquée dans le rectangle rouge, **vous avez une alcoolémie supérieure au taux contraventionnel : NE PAS CONDUIRE.**

3- Au-delà de 10 minutes, l'interprétation n'est plus possible.

Les résultats de ce test ne peuvent en aucun cas être opposables à ceux obtenus par les forces de l'ordre, lors de contrôles officiels. Les décisions prises par l'utilisateur en fonction du résultat de ce test sont sous son entière responsabilité. Elles ne peuvent engager celle du fabricant et/ou de ses distributeurs. Les éthylotests chimiques sont des indicateurs d'alcoolémie et non des instruments de mesure.

En cas de doute sur votre interprétation, nous vous conseillons de ne pas conduire.

Précautions :

Ce produit est un tube en verre donc fragile. Tenir hors de la portée des enfants. Ne pas utiliser le test si les membranes d'aluminium sont déjà perforées, si le verre est fêlé ou cassé, ou si le réactif est déjà vert. Ne pas diriger le test vers une personne pendant le soufflé. Ne pas inspirer. Ne pas avaler. En cas de contact du réactif avec les yeux ou la peau, rincer abondamment avec de l'eau et demander si besoin un avis médical. En cas d'ingestion, appeler un service d'urgence médicale (par exemple le 15 ou le 112).

À jeter dans une poubelle après utilisation en raison de la présence de produits chimiques contenus dans l'éthylotest.

L'utilisation non conforme à la notice et/ou le non-respect des précautions dégage le fabricant et ses distributeurs de toute responsabilité.